

INSTRUKCJA OBSŁUGI

IHEALTH PO3M – PULSOKSYMETR

1. Ładowanie baterii

Podłącz urządzenie do USB na trzy godziny lub dopóki wskaźnik ładowania baterii nie zgaśnie.

2. Pobierz aplikację

Pobierz i zainstaluj aplikację iHealth z App Store lub Google Play. Więcej o aplikacji:

<https://ihealthlabs.eu/en/53-ihealth-myvitals.html>

3. Utwórz konto

Po pobraniu aplikacji zarejestruj się i utwórz swoje osobiste konto, postępując według instrukcji pojawiającej się na ekranie. Dzięki temu uzyskasz dostęp do darmowego i bezpiecznego konta w chmurze iHealth.

4. Włączanie modułu Bluetooth

Włącz Bluetooth w menu „Ustawienia” urządzenia z systemem iOS lub Android. (Data i godzina pulsoksymetru zostaną zsynchronizowane z urządzeniem przy pierwszym pomyślnym połączeniu). Po włączeniu Bluetooth pulsoksymetr połączy się automatycznie po uruchomieniu aplikacji.

POMIAR

1. Otwórz zacisk pulsoksymetru PO3M, a następnie umieść w nim palec lewej, paznokciem do dołu, jak na zdjęciu.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

IHEALTH PO3M – PULSOKSYMETR

5. Ładowanie baterii

Podłącz urządzenie do USB na trzy godziny lub dopóki wskaźnik ładowania baterii nie zgaśnie.

6. Pobierz aplikację

Pobierz i zainstaluj aplikację iHealth z App Store lub Google Play. Więcej o aplikacji:

<https://ihealthlabs.eu/en/53-ihealth-myvitals.html>

7. Utwórz konto

Po pobraniu aplikacji zarejestruj się i utwórz swoje osobiste konto, postępując według instrukcji pojawiającej się na ekranie. Dzięki temu uzyskasz dostęp do darmowego i bezpiecznego konta w chmurze iHealth.

8. Włączanie modułu Bluetooth

Włącz Bluetooth w menu „Ustawienia” urządzenia z systemem iOS lub Android. (Data i godzina pulsoksymetru zostaną zsynchronizowane z urządzeniem przy pierwszym pomyślnym połączeniu). Po włączeniu Bluetooth pulsoksymetr połączy się automatycznie po uruchomieniu aplikacji.

POMIAR

1. Otwórz zacisk pulsoksymetru PO3M, a następnie umieść w nim palec lewej, paznokciem do dołu, jak na zdjęciu.



2. Na panelu przednim naciśnij raz przycisk „Start”, aby włączyć pulsoksymetr.
3. Trzymaj rękę nieruchomo.
4. Po kilku sekundach odczyt SpO2 pojawi się na ekranie wyświetlacza pulsoksymetru i aplikacji, jeśli jest włączona.
5. Jeśli siła sygnału jest zbyt niska, przełącz na inny palec i ponownie przeprowadź test.

5



1. Na panelu przednim naciśnij raz przycisk „Start”, aby włączyć pulsoksymetr.
2. Trzymaj rękę nieruchomo.
3. Po kilku sekundach odczyt SpO2 pojawi się na ekranie wyświetlacza pulsoksymetru i aplikacji, jeśli jest włączona.
4. Jeśli siła sygnału jest zbyt niska, przełącz na inny palec i ponownie przeprowadź test.

5

